

Instrucciones de uso



proxeo

Pieza de mano

HP-44 M / HP-44 T / HP-44 TS / HP-44 T MW / HP-44 T SD

Contra-ángulos

WP-64 M / WP-64 MU / WP-66 M / WP-64 T / WP-64 TS

Índice

Símbolos	4
en las instrucciones de uso.....	4
en el producto sanitario/el embalaje	5
1. Introducción	6
2. Indicaciones de seguridad	9
3. Descripción del producto	11
4. Puesta en marcha	12
Conexión / desconexión.....	12
Cambio del instrumento rotatorio	15
Prueba de funcionamiento	23
5. Higiene y mantenimiento	24
Indicaciones generales.....	24
Limitación en el procesamiento.....	26
Primer tratamiento en el lugar de uso.....	27

Limpieza manual	28
Desinfección manual	29
Limpieza y desinfección mecanizadas	30
Secado	31
Control, mantenimiento e inspección	32
Embalaje.....	36
Esterilización.....	37
Almacenamiento	40
6. Servicio	41
7. Accesorios, consumibles, piezas de repuesto y otros productos sanitarios recomendados por W&H	42
8. Datos técnicos.....	43
9. Desecho	45
Condiciones de garantía	46
Servicios Técnicos Autorizados W&H	47



¡ATENCIÓN!
Riesgo de lesiones
a personas



¡AVISO IMPORTANTE!
Riesgo de
daños en objetos



Explicaciones generales,
sin riesgo para
personas u objetos



No desechar junto con la
basura doméstica



No reutilizar

Símbolos

en el producto sanitario/el embalaje



Marcado CE
con número de
identificación del
organismo notificado



DataMatrix Code para la
información del producto,
incluida la UDI (Unique
Device Identification)



Estructura de datos según el
Health Industry Bar Code



Número de artículo



Esterilizable hasta la
temperatura indicada



Producto sanitario



Número de serie



Termodesinfectable



Marca de verificación UL
para componentes
reconocidos en Canadá y
EE. UU.



Fecha de fabricación



¡Atención! Según las leyes Federales de los EE. UU., la venta de este producto solo está permitida mediante o por la indicación de un dentista, un médico, un veterinario u otro facultativo médico con un permiso en el Estado Federal en el que ejerce el facultativo y desea utilizar este producto o promover su uso.



Fabricante



Observar las instrucciones
de uso

1. Introducción

La satisfacción de nuestros clientes comienza por la política de calidad de W&H. El presente producto sanitario fue elaborado, producido y controlado según las leyes y normativas vigentes.

Para su seguridad y la de sus pacientes

Lea las instrucciones de uso antes de la primera aplicación del producto. Estas le guiarán en el uso del producto sanitario, proporcionándole un funcionamiento libre de molestias, rentable y seguro.



Siga las indicaciones de seguridad.

Uso adecuado

La pieza de mano/contra-ángulo Proxeo sirve para la limpieza y el pulido de la superficie dental y los empastes.



Un uso inadecuado puede dañar el producto sanitario y provocar riesgos y peligros para el paciente, el usuario y terceros.



Cualificación del usuario

Durante el desarrollo y diseño del producto sanitario, hemos pensado en dentistas, higienistas dentales, especialistas en el tratamiento dental (profilaxis) y asistentes para el tratamiento dental como grupos de destinatarios.

Responsabilidad del fabricante

El fabricante solo puede considerarse responsable a efectos de seguridad, fiabilidad y rendimiento del producto sanitario si se cumplen las siguientes condiciones:

- > El producto sanitario debe utilizarse siguiendo las instrucciones contenidas en estas instrucciones de uso.
- > El producto sanitario no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- > Las modificaciones o reparaciones debe realizarlas solamente el Servicio Técnico Autorizado W&H (vea la página 47).



Aplicación especializada

El producto sanitario está destinado exclusivamente a aplicaciones especializadas conforme al uso adecuado, debiendo observarse en todo momento tanto las normas de protección en el trabajo y de prevención de accidentes como estas instrucciones de uso.

Los trabajos de procesamiento y mantenimiento del producto sanitario deben encomendarse exclusivamente a personas instruidas en autoprotección, protección de pacientes y protección contra infecciones.

Un uso inadecuado (p. ej., por higiene y mantenimiento deficientes), el incumplimiento de nuestras instrucciones de uso o la utilización de accesorios y piezas de repuesto no homologados por W&H nos exime de toda responsabilidad respecto a garantía y de cualesquiera otras pretensiones.



Se debe informar de todos los incidentes graves relacionados con el producto sanitario al fabricante y a las autoridades competentes.

2. Indicaciones de seguridad



- > Guarde el producto sanitario 24 horas antes de la primera puesta en marcha a temperatura ambiente.
- > El producto sanitario solo debe utilizarse con unidades de alimentación que cumplan las normas IEC 60601-1 (EN 60601-1) e IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2).
- > Utilice solo aire refrigerante producido por compresores dentales, filtrado, libre de aceite y refrigerado.
- > Asegúrese siempre de las correctas condiciones de funcionamiento.
- > Antes de cada aplicación, compruebe que el producto sanitario no tenga desperfectos ni piezas sueltas.
- > No ponga en marcha el producto sanitario en caso de estar dañado.
- > Antes de cada aplicación, realice una prueba de funcionamiento.

Higiene y mantenimiento antes de la primera aplicación




- > El producto sanitario se entrega sellado en una bolsa de PE y sin esterilizar.
- > La bolsa de PE y el embalaje no son esterilizables.




- > Limpie, desinfecte y lubrique el producto sanitario.
- > Esterilice el producto sanitario.

3. Descripción del producto

Pieza de mano/contrángulo

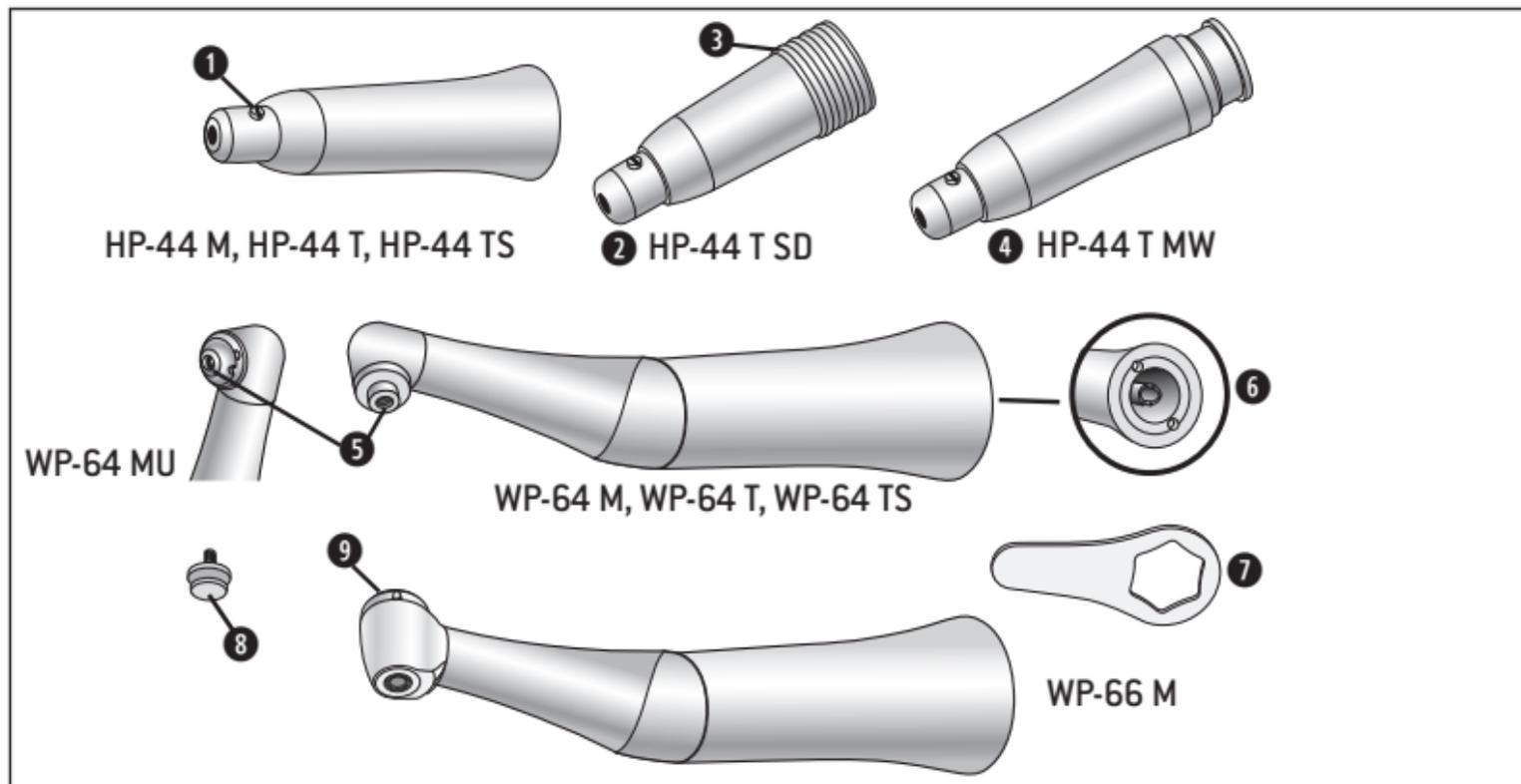

- 1 Pestaña
- 2 Conexión StarDental®
- 3 Casquillo de empuje
- 4 Conexión Midwest®
- 5 Rosca
- 6 Eje
- 7 Llave
- 8 Adaptador a presión
- 9 Botón de presión
(WP-66 M)

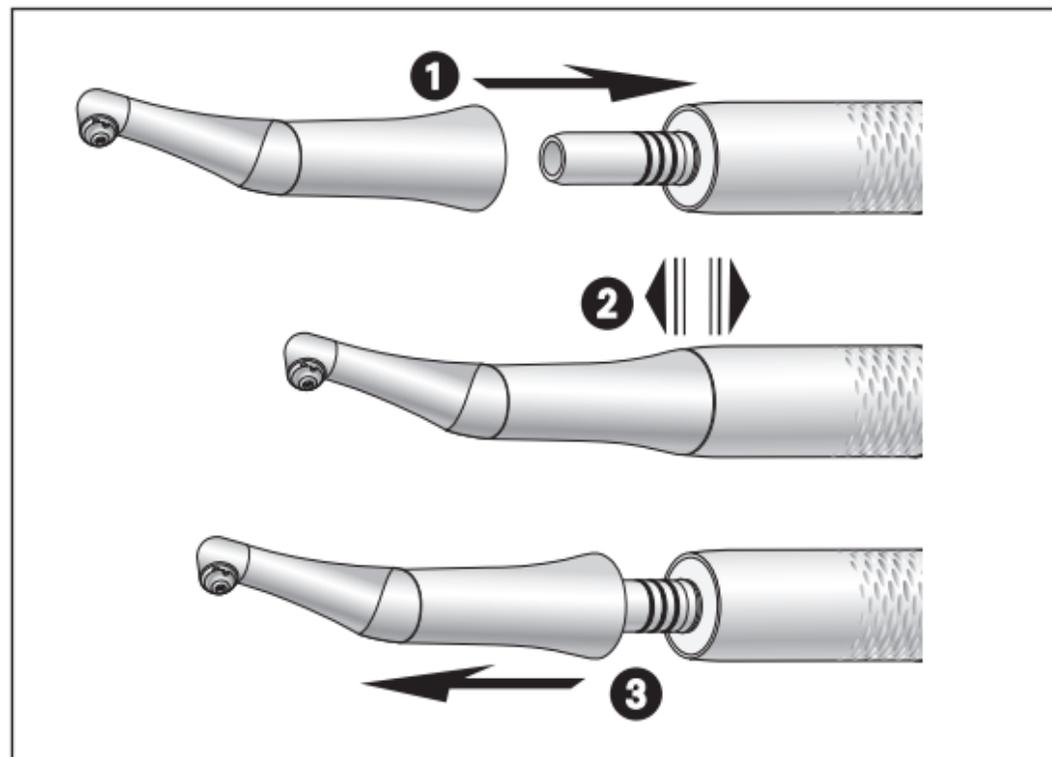

Conexión ISO



¡No conectar ni desconectar el producto sanitario durante el funcionamiento!

❶ Conecte el producto sanitario al micromotor.




❷ Compruebe que la sujeción esté fija.

❸ Desconecte el producto sanitario.



HP-44 TS, WP-64 TS solo pueden utilizarse en los micromotores dentales cuya acoplamiento ISO presente una longitud igual o inferior a 23 mm.

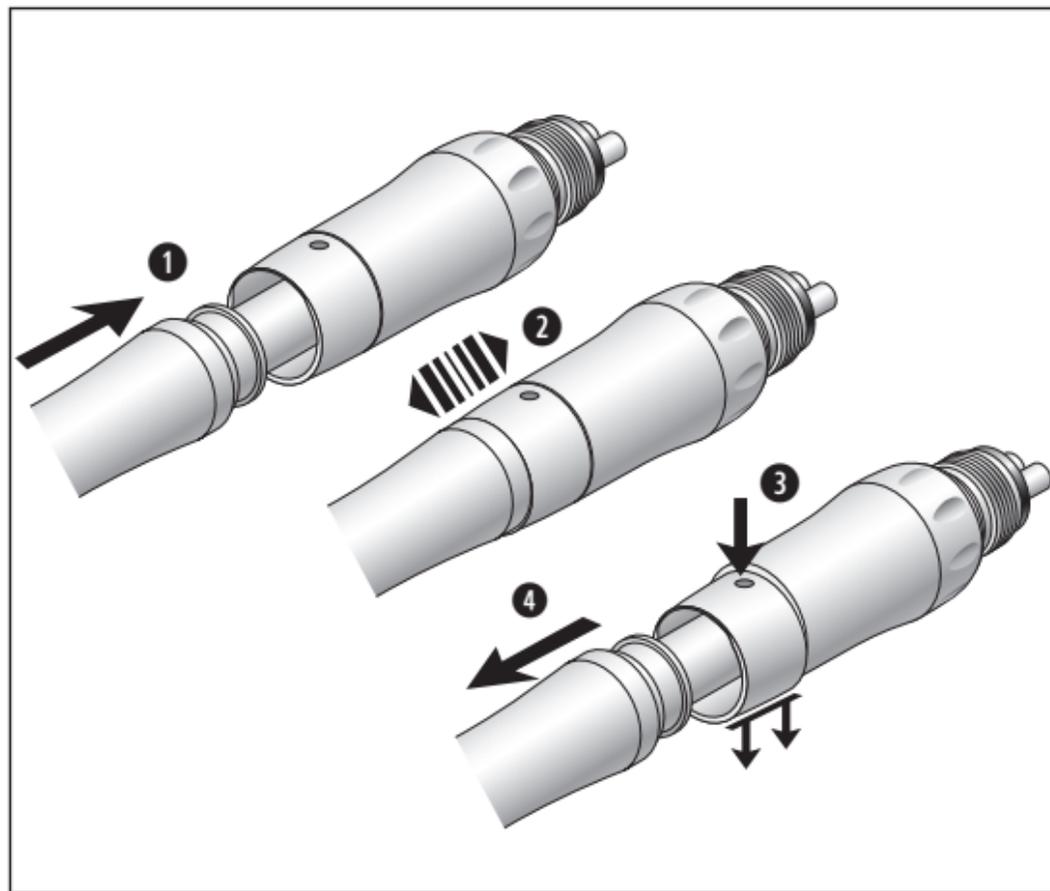

Conexión Midwest®



¡No conectar ni desconectar el producto sanitario durante el funcionamiento!


❶ Conecte el producto sanitario al micromotor.



❷ Compruebe que la sujeción esté fija.

❸ Presione la funda del micromotor.

❹ Desconecte el producto sanitario.

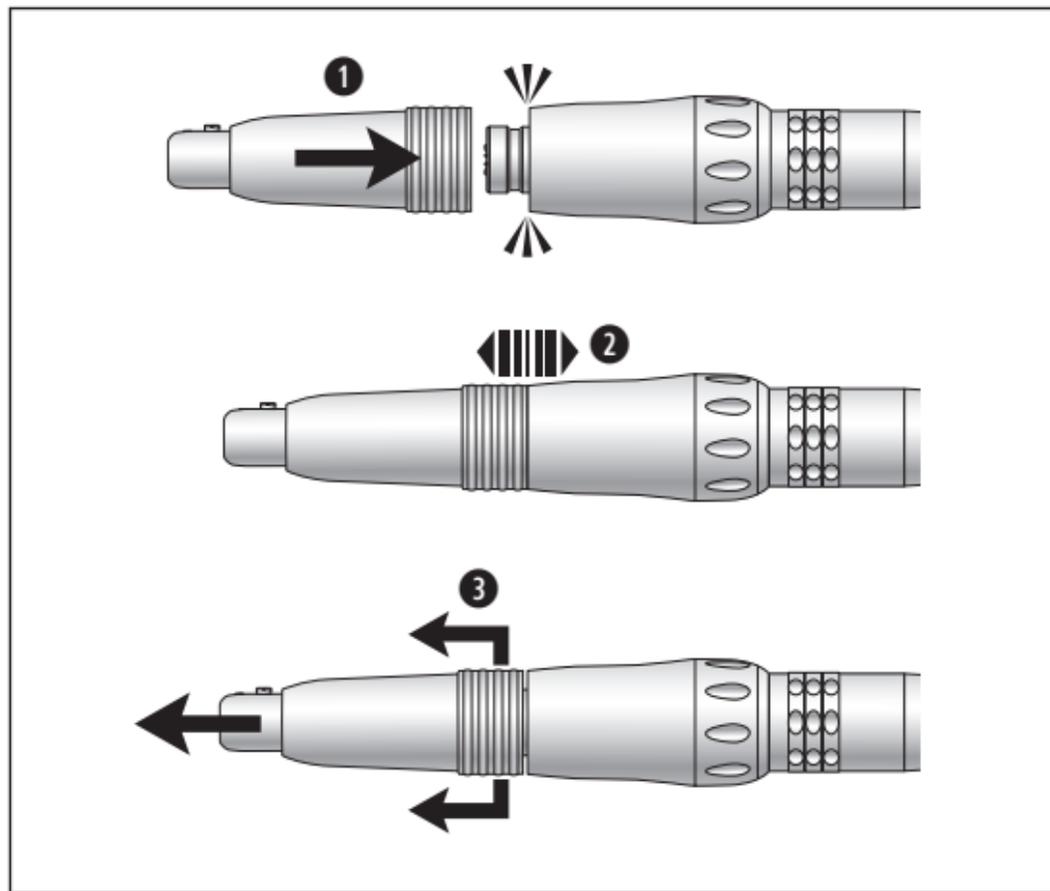

Conexión StarDental®



¡No conectar ni desconectar el producto sanitario durante el funcionamiento!

❶ Conecte el producto sanitario al micromotor.



❷ Compruebe que la sujeción esté fija.

❸ Accione casquillo de empuje del producto sanitario para desconectarlo del micromotor.



Instrumentos rotatorios

- > Cabezal desechable Prophy con copa o cepillo
- > Copa o cepillo de profilaxis
- > Adaptador a presión para copa o cepillo de profilaxis



- > Los instrumentos rotatorios son desechables y deben sustituirse después de cada tratamiento.



- > Utilice únicamente instrumentos rotatorios que estén en perfecto estado. Observe las indicaciones del fabricante.
- > Utilice únicamente instrumentos rotatorios (para WP-66 M) cuyos vástagos cumplan con los requisitos de la norma ISO 1797.
- > Coloque el instrumento rotatorio solamente cuando el producto sanitario se encuentre detenido.
- > Nunca sujete el instrumento rotatorio cuando aún esté en funcionamiento o en desaceleración.



- > Utilice el producto sanitario solamente hacia la derecha. El instrumento rotatorio puede aflojarse hacia la izquierda (peligro de lesiones).
- > Nunca presione el sistema de sujeción del producto sanitario durante la aplicación. En caso contrario esto provocaría que se soltara el instrumento rotatorio, que se dañara el sistema de sujeción o que se calentara el producto sanitario. ¡Peligro de quemaduras!



Pieza de mano HP-44 M, HP-44 T, HP-44 TS, HP-44 T MW, HP-44 T SD (cabezal desechable Prophy con eje de plástico, sistema Doriot)

- > Utilice únicamente cabezales desechables Prophy con eje de plástico para el sistema Doriot. Los cabezales desechables Prophy con ejes de metal dañan el sistema de sujeción.



- > Observe las indicaciones del fabricante de los cabezales desechables.




- > La pieza de mano contiene un sistema de sujeción automático.

Contra-ángulo WP-64 M, WP-64 T, WP-64 TS (sistema Young)

-  > El cabezal del contra-ángulo está equipado con una junta Triple Seal de Young Dental.
- > Para garantizar la estanqueidad, utilice únicamente copas o cepillos de profilaxis Young Dental para el sistema atornillable.

Contra-ángulo WP-64 MU (sistema universal)

-  > El cabezal del contra-ángulo está equipado con una junta W&H.
Puede utilizar todas las copas o cepillos de profilaxis atornillables (rosca 1-72 UNF 2A) o a presión.

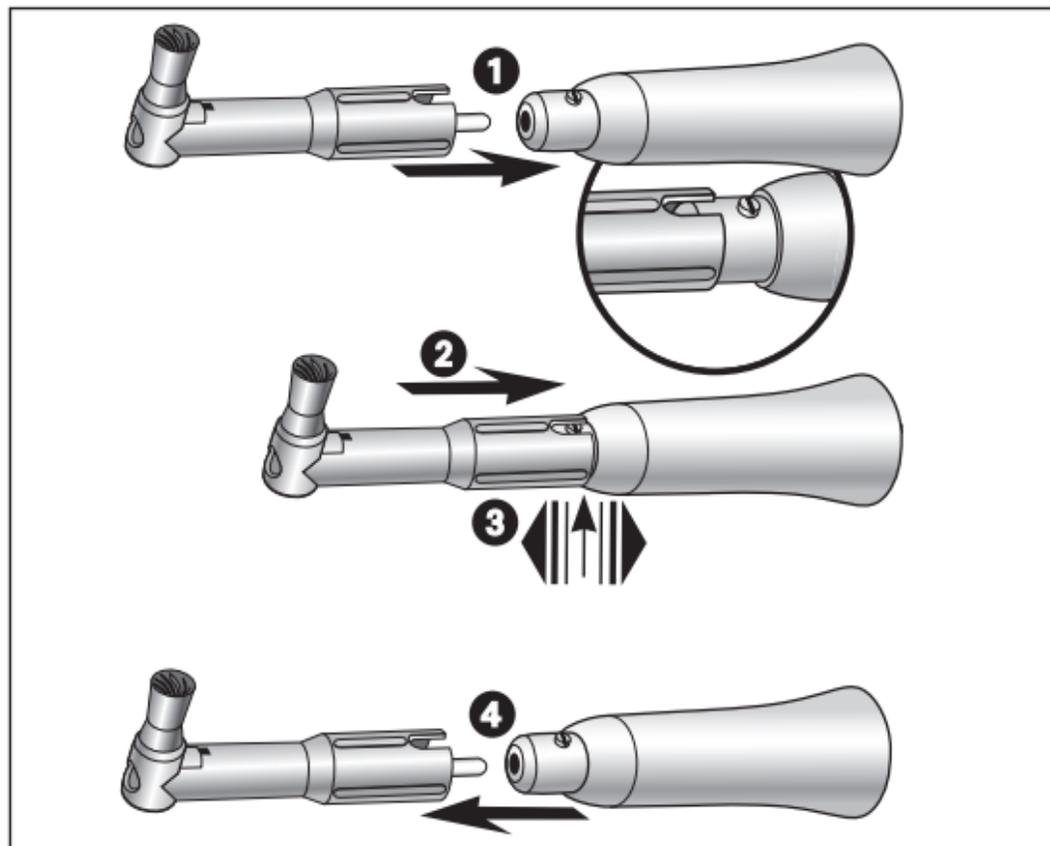

Pieza de mano HP-44 M, HP-44 T, HP-44 TS, HP-44 T MW, HP-44 T SD


> Cabezal desechable Prophy con copa o cepillo

- 1 Coloque ahora la ranura del cabezal desechable hacia la pestaña de la pieza de mano.
- 2 Conecte el cabezal desechable en la pieza de mano hasta el tope.



- 3 Compruebe que la sujeción esté fija.

- 4 Desconecte el cabezal desechable.

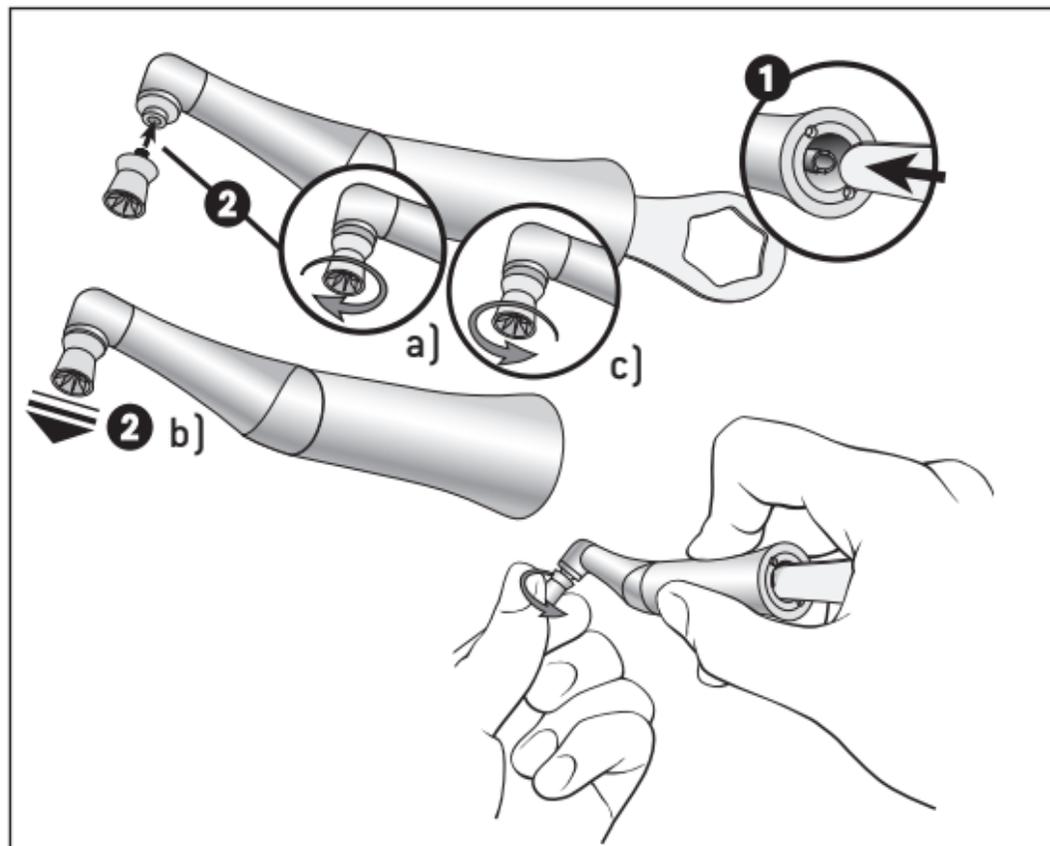

Contra-ángulo WP-64 M, WP-64 MU, WP-64 T, WP-64 TS


> Copa o cepillo de profilaxis

- 1 Bloquee el eje del contra-ángulo con la llave.
- 2 a) Enrosque la copa o el cepillo hasta el tope.



b) Compruebe que la sujeción esté fija.

c) Desenrosque la copa o el cepillo.

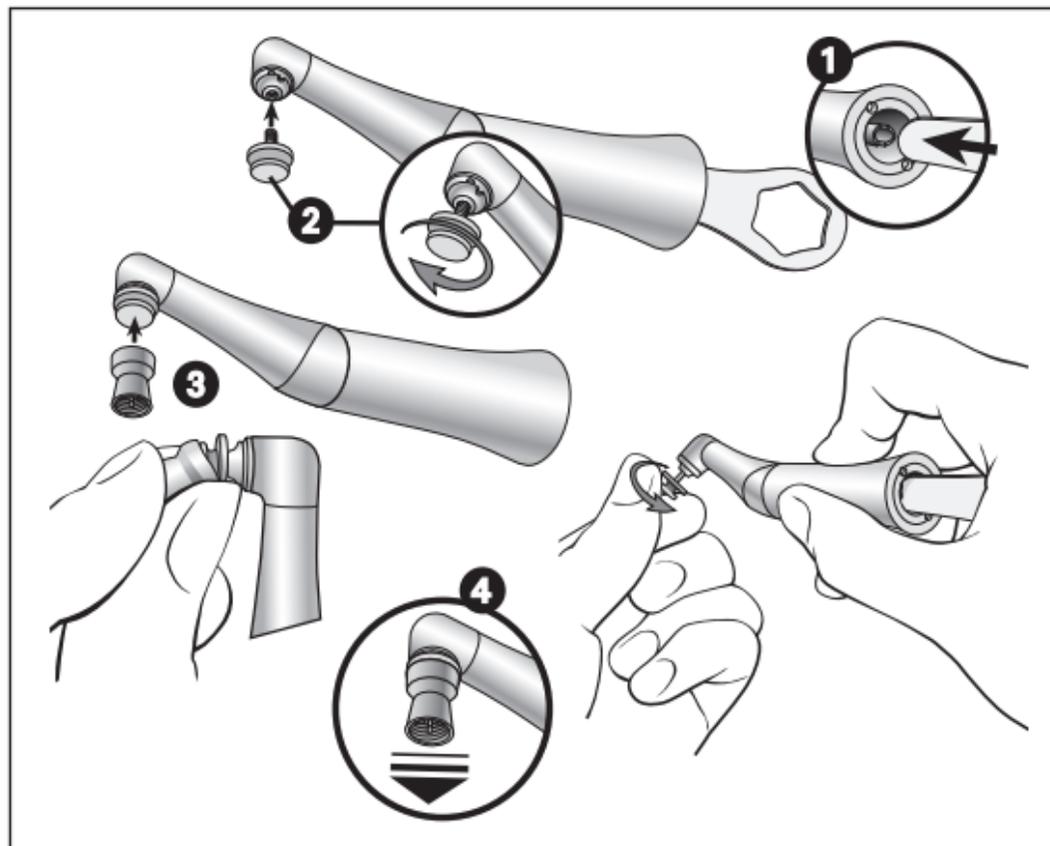

Contra-ángulo WP-64 MU


- > Adaptador a presión
- > Copa o cepillo de profilaxis

- 1 Bloquee el eje del contra-ángulo con la llave.
- 2 Enrosque el adaptador hasta el tope.
- 3 Coloque la copa o el cepillo en el adaptador.




- 4 Compruebe que la sujeción esté fija.

o bien

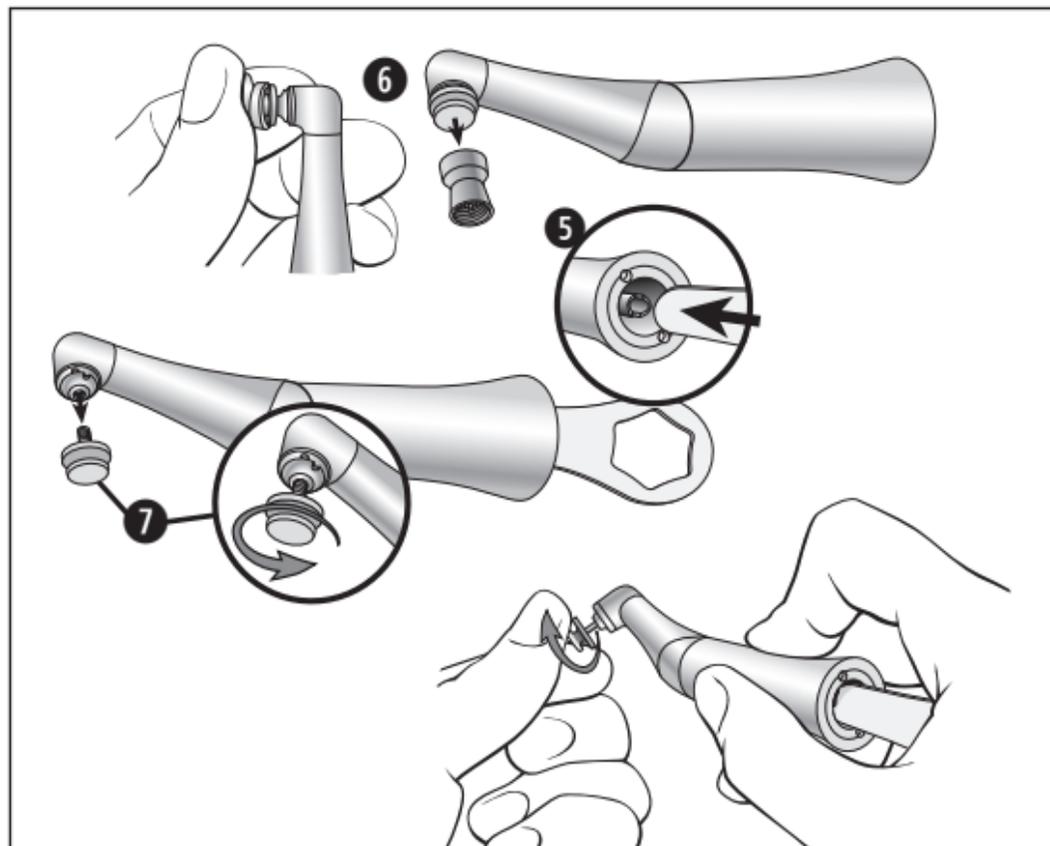

- 5 Bloquee el eje del contra-ángulo con la llave.
- 6 Desconecte la copa o el cepillo del adaptador.
- 7 Desatornille el adaptador.

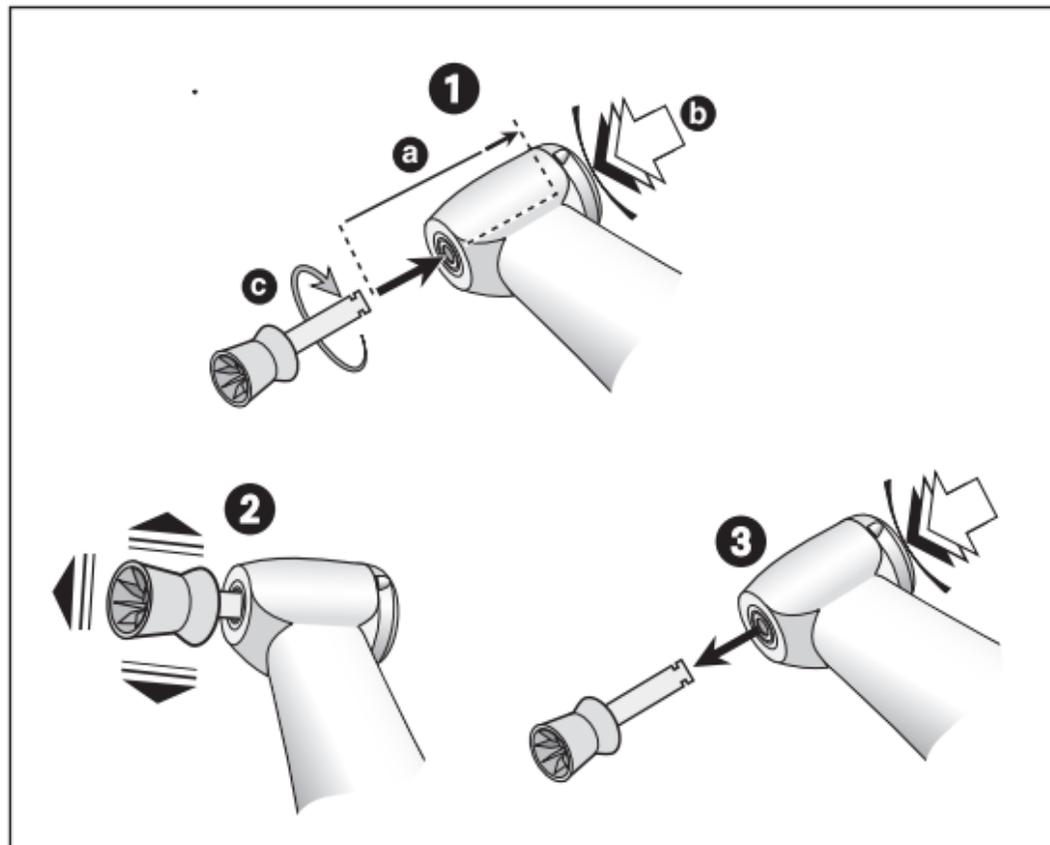

Contra-ángulo WP-66 M

- > Copa o cepillo de profilaxis
- > Diámetro del vástago del instrumento 2,35 mm

❶ Introduzca la copa o el cepillo hasta el tope (a). Presione el botón de presión (b) y gire la copa o el cepillo hasta que encaje (c).



❷ Compruebe que la sujeción esté fija.

❸ Presione el botón de presión y retire la copa o el cepillo.

Prueba de funcionamiento



¡No mantenga el producto sanitario a la altura de los ojos!

- > Coloque el instrumento rotatorio.
- > Ponga el producto sanitario en marcha.



En caso de problemas de funcionamiento (p. ej., vibraciones, sonidos inusuales, calentamiento), **ponga el producto sanitario inmediatamente fuera de servicio** y diríjase a un Servicio Técnico Autorizado W&H.



Respete las leyes, directivas, normas y especificaciones locales y nacionales sobre limpieza, desinfección y esterilización.



Las indicaciones sobre el procesamiento validado sirven como ejemplo ilustrativo para un procesamiento del producto sanitario conforme a la norma ISO 17664.



> Utilice equipos de protección, gafas de seguridad, mascarilla y guantes.



> Para el secado manual, utilice únicamente aire comprimido libre de aceite y filtrado, con una presión máxima de 3 bar.

Productos de limpieza y desinfección



- > Siga las indicaciones, instrucciones y advertencias del fabricante de los productos de limpieza y desinfección.
- > Utilice únicamente detergentes aptos para la limpieza o desinfección de productos sanitarios de metal y plástico.
- > Siempre deben respetarse las concentraciones y tiempos de actuación indicados por el fabricante del desinfectante.
- > Utilice desinfectantes aprobados y de los cuales se ha demostrado su eficacia por la Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH, Asociación de higiene aplicada), la Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP, Sociedad austriaca para la higiene, la microbiología y la medicina preventiva), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) de Estados Unidos.



Si los productos de limpieza y desinfección indicados no están disponibles, es responsabilidad del usuario validar su procedimiento.



La vida útil y la operatividad del producto sanitario vienen determinadas en gran medida por la fatiga mecánica durante el uso y los efectos químicos durante el procesamiento.

- > Envíe los productos sanitarios gastados o dañados o los productos sanitarios con modificaciones de material a un Servicio Técnico Autorizado W&H.

Ciclos de procesamiento



- > En el caso del producto sanitario de W&H, le recomendamos realizar un servicio técnico regular después de 1000 ciclos de procesamiento o de un año.



Limpie el producto sanitario inmediatamente después de cada tratamiento para eliminar los líquidos que puedan haber penetrado (p. ej., sangre, saliva, etc.) y evitar el bloqueo de las piezas internas.

- > Active el producto sanitario al menos 10 segundos sin carga.
- > Asegúrese de que se enjuaguen todos los orificios de salida.



- > Limpie el producto sanitario por completo con desinfectante.
- > Extraiga el instrumento rotatorio.
- > Desconecte el producto sanitario.



Tenga en cuenta que el desinfectante utilizado durante el tratamiento previo es solo para la protección personal y no puede sustituir al paso de desinfección posterior a la limpieza.

 ¡No introduzca el producto sanitario en la solución de desinfección ni en el baño ultrasónico!

- > Limpie el producto sanitario bajo agua potable corriente (<35 °C / <95 °F).
- > Lave y frote con un cepillo todas las superficies interiores y exteriores.
- > Desplace las piezas móviles varias veces en todas direcciones.
- > Elimine los restos de líquido con aire comprimido.



> W&H recomienda la desinfección mediante un paño desinfectante.



Un laboratorio de pruebas independiente proporcionó indicios de la adecuación básica del producto sanitario para una desinfección manual eficaz mediante los desinfectantes «mikrozid® AF wipes» (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) y «CaviWipes™» (Metrex).



W&H recomienda la limpieza y la desinfección mecanizadas con un aparato de limpieza y desinfección (LD).
(Excepto: HP-44 T, HP-44 TS, HP-44 T MW, HP-44 T SD, WP-64 T, WP-64 TS)

> Siga las indicaciones, instrucciones y advertencias del fabricante de los aparatos de limpieza y desinfección y de los productos de limpieza y desinfección.



Un laboratorio de pruebas independiente proporcionó indicios de la adecuación básica del producto sanitario para una desinfección mecanizada eficaz mediante el uso del aparato de limpieza y desinfección "Miele PG 8582 CD" (empresa Miele & Cie. KG, Gütersloh) y el producto de limpieza "Dr. Weigert neodisher® MediClean forte" (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg) según la norma ISO 15883.

> Limpieza a 55 °C (131 °F) – 5 minutos

> Desinfección a 93 °C (200 °F) – 5 minutos



- > Asegúrese de que el producto sanitario quede completamente seco por dentro y por fuera después de la limpieza y desinfección.
- > Elimine los restos de líquido con aire comprimido.

Control



- > Tras la limpieza y desinfección, asegúrese de que el producto sanitario no contenga daños, restos de suciedad visibles ni modificaciones de las superficies.
- > Vuelva a procesar los productos sanitarios sucios.
- > Esterilice el producto sanitario tras su limpieza, desinfección y lubricación.

Lubricación

-  > Lubrique el producto sanitario seco inmediatamente después de la limpieza o la desinfección.
- > Oriente el producto sanitario hacia abajo.

Ciclos de mantenimiento recomendados


- > Indispensable después de cada limpieza interior
 - > Antes de cada esterilización
- o bien
- > Tras cada 30 minutos de uso o 1 vez al día

Con W&H Service Oil F1, MD-400

- > Siga las instrucciones de la botella de aceite en spray y del embalaje.
- o bien

Con W&H Assistina

- > Siga las instrucciones contenidas en las instrucciones de uso de Assistina.

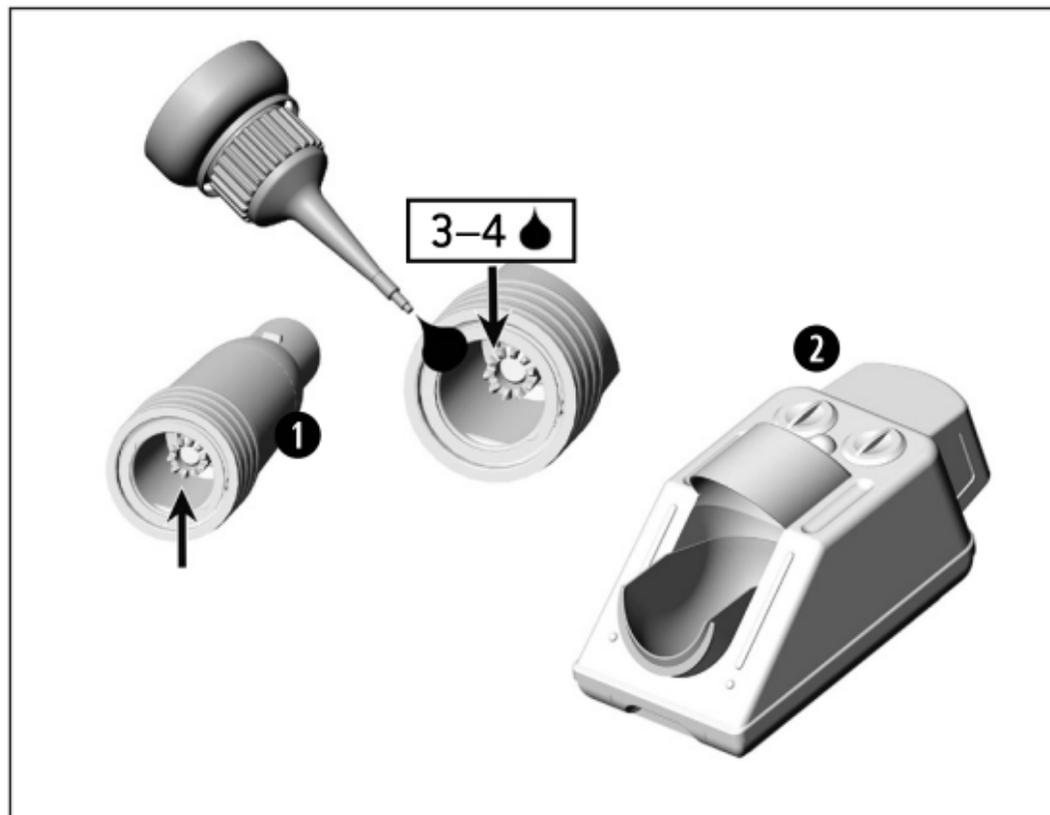

Lubricación diaria HP-44 T SD

❶ Con W&H Service Oil F1, MD-30

- > Introduzca 3 o 4 gotas en el producto sanitario.
- > Lleve a cabo una prueba de funcionamiento.

o bien

❷ Con W&H Assistina

- > Siga las instrucciones contenidas en las instrucciones de uso de Assistina.
- > Utilice el adaptador de W&H REF 07535400 [accesorio] para la pieza de mano StarDental®.

Inspección después de la lubricación



- > Ponga el producto sanitario boca abajo.
- > Ponga el producto sanitario en marcha para que pueda salir el lubricante sobrante.
- > El lubricante sobrante puede provocar que el producto sanitario se caliente en exceso.



Embale el producto sanitario y los accesorios en envases adecuados para el proceso de esterilización que cumplan con los siguientes requisitos:

- > El envase para el proceso de esterilización debe cumplir con las normas válidas en cuanto a calidad y aplicación y debe ser adecuado para el proceso de esterilización.
- > El envase para el proceso de esterilización debe ser lo suficientemente grande para el producto a esterilizar.
- > El envase para el proceso de esterilización lleno no debe estar tenso.

 W&H recomienda la esterilización según las normas EN 13060, EN 285 o ANSI/AAMI ST55.

- 
- > Siga las indicaciones, instrucciones y advertencias del fabricante de los esterilizadores de vapor.
 - > El programa seleccionado debe ser adecuado para el producto sanitario.

Procedimientos de esterilización recomendados

- > «Dynamic-air-removal prevacuum cycle» (Tipo B) / «Steam-flush pressure-pulse cycle» (Tipo S)^{*/**}
134 °C (273 °F) durante al menos 3 minutos, 132 °C (270 °F) durante al menos 4 minutos
- > «Gravity-displacement cycle» (Tipo N)^{**}
121 °C (250 °F) durante al menos 30 minutos
- > Temperatura máxima de esterilización: 135 °C (275 °F)



Un laboratorio de pruebas independiente proporcionó indicios de la adecuación básica del producto sanitario para una esterilización eficaz mediante el uso del esterilizador de vapor LISA 517 B17L* (W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto [BG]), el esterilizador de vapor Systec VE-150* (Systec) y el esterilizador de vapor CertoClav MultiControl MC2-S09S273** (CertoClav GmbH, Traun).

«Dynamic-air-removal prevacuum cycle» (Tipo B): 134 °C (273 °F) – 3 minutos*, 132 °C (270 °F) – 4 minutos*/**
«Steam-flush pressure-pulse cycle» (Tipo S): 134 °C (273 °F) – 3 minutos*, 132 °C (270 °F) – 4 minutos*/**
«Gravity-displacement cycle» (Tipo N): 121 °C (250 °F) – 30 minutos**

Tiempos de secado:

«Dynamic-air-removal prevacuum cycle» (Tipo B): 132 °C (270 °F) – 30 minutos**
«Steam-flush pressure-pulse cycle» (Tipo S): 132 °C (270 °F) – 30 minutos**
«Gravity-displacement cycle» (Tipo N): 121 °C (250 °F) – 30 minutos**

* EN 13060, EN 285, ISO 17665

** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79



- > Almacene los productos esterilizables en un lugar libre de polvo y seco.
- > La validez del producto esterilizable depende de las condiciones de almacenamiento y del tipo de embalaje.

6. Servicio

Reparaciones y devolución

En caso de problemas de funcionamiento, diríjase directamente a un Servicio Técnico Autorizado W&H.

Las reparaciones y trabajos de mantenimiento debe realizarlos solamente el Servicio Técnico Autorizado W&H.



> Asegúrese de que el producto sanitario se ha sometido al procesamiento completo antes de su devolución.

7. Accesorios, consumibles, piezas de repuesto y otros productos sanitarios recomendados por W&H



Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales W&H o accesorios cuyo uso esté homologado por W&H. **Proveedor:** distribuidores W&H

000301xx	W&H Assistina	Encontrará una selección de cabezales desechables Prophy, copas o cepillos de profilaxis en la página web de W&H o de Young Dental: http://wh.com www.youngdental.com o bien en su distribuidor dental
30310000	W&H Assistina TWIN (MB-302)	
03103500	Adaptador Assistina para piezas de mano W&H y Midwest®	
07535400	Adaptador Assistina para piezas de mano StarDental®	
03304500	Service Oil F1, MD-30	
10940021	W&H Service Oil F1, MD-400 (6 uds.)	
02038200	Boquilla con adaptador de spray para piezas de mano y contra-ángulos	
01957300	Llave	
04530600	Adaptador a presión (WP-64 MU)	
07979710	Cabezal desechable Prophy con copa, 105°, fijo / verde oscuro (100 uds.)	
07994950	Cabezal desechable Prophy con copa, 105°, suave / verde claro (100 uds.)	

8. Datos técnicos

	HP-44 T WP-64 T	WP-66 M	HP-44 M WP-64 M WP-64 MU	HP-44 TS WP-64 TS	HP-44 T SD HP-44 T MW
Conexión para el micromotor según la norma	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964	–	StarDental®* o bien Midwest®*
Conexión para el micromotor con longitud máx. de 23 mm según la norma	–	–	–	ISO 3964	–
Diámetro exterior de la cubierta de sujeción (mm)	18	20	20	18	–
Diámetro del vástago del instrument ISO 1797 (mm)	–	2,35	–	–	–
Relación de transmisión	4:1				
Número máx. de revoluciones (min ⁻¹)	10.000				
Revoluciones máximas del instrumento rotatorio (min ⁻¹)	2.500				

min⁻¹ (revoluciones por minuto)

* StarDental® es una marca registrada de DENTALEZ Inc.

* Midwest® es una marca registrada de Dentsply International Inc.



Indicaciones de temperatura

Temperatura del producto sanitario en el lado del usuario:	máximo 55 °C (131 °F)
Temperatura del producto sanitario en el lado del paciente:	máximo 50 °C (122 °F)
Temperatura de la pieza de trabajo (instrumento rotatorio):	máximo 41 °C (105,8 °F)

Condiciones ambientales

Temperatura durante el almacenaje y el transporte:	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humedad del aire durante el almacenaje y el transporte:	del 8 % al 80 % (relativa), sin condensación
Temperatura en funcionamiento:	+10 °C a +35 °C (+50 °F a +95 °F)
Humedad del aire en funcionamiento:	del 15 % al 80 % (relativa), sin condensación

9. Desecho



En el momento de desechar el aparato, asegúrese de que las piezas no estén contaminadas.



Respete las leyes, directivas, normas y especificaciones locales y nacionales sobre el desecho.

- > Producto sanitario
- > Embalaje

Condiciones de garantía

Este producto sanitario W&H ha sido fabricado con el mayor cuidado por personal altamente cualificado. Los numerosos controles y las comprobaciones garantizan su perfecto funcionamiento. Por favor tenga en cuenta que los derechos de la garantía son solo válidos si se han observado todas las instrucciones proporcionadas en las instrucciones de uso que se incluyen.

W&H se hace responsable como fabricante de los fallos en el material o de fabricación a partir de la fecha de compra y durante un periodo de garantía de 24 meses. Los accesorios y los consumibles (llave y adaptador a presión) no se incluyen en la garantía.

¡No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso incorrecto o por las reparaciones realizadas por terceros no autorizados por W&H!

Deberá dirigir las reclamaciones de garantía al proveedor o a un Servicio Técnico Autorizado W&H adjuntando el resguardo de la compra. El cumplimiento de una aplicación de la garantía no amplía ni el periodo de la garantía ni un posible periodo de responsabilidad.

24 meses de garantía

Servicios Técnicos Autorizados W&H

Visite el sitio web de W&H en la dirección <http://wh.com>

En el elemento de menú «Servicios» encontrará su Servicio Técnico Autorizado W&H más cercano.

O escanee el código QR.





W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t +43 6274 6236-0,
office@wh.com

f +43 6274 6236-55
wh.com

Form-Nr. 50815 ASP
Rev. 004 / 24.07.2023
Salvo modificaciones