


Manual rápido para Assistina Twin

assistina TWIN

¡Este manual rápido NO reemplaza a las instrucciones de uso de Assistina!

En caso de preguntas o dudas, consulte siempre las instrucciones de uso.

 Utilice indumentaria de protección, gafas de seguridad, mascarilla y guantes.

1. Colocar/retirar cartuchos




a) Retire la cubierta del compartimento de cartuchos.



b) Colocar/retirar cartuchos
 > Coloque los cartuchos hasta el tope.
 > Saque los cartuchos.
c) Coloque la cubierta del compartimento de cartuchos.

 Los cartuchos se deben encontrar a temperatura ambiente en el momento de la colocación.

 La púa para cartuchos del producto sanitario es puntiaguda. Preste atención al peligro de lesiones que puede provocar la púa saliente.

2. Colocar/retirar filtros



a) Abra la cubierta del compartimento de filtros.




b) Colocar/retirar filtros
 > Coloque el filtro hasta el tope.
 > Saque el filtro.
c) Cierre la cubierta del compartimento de filtros.



Ventana corredera abierta:
 > Cierre la ventana corredera.

Los LED de las cámaras se iluminan de color naranja.

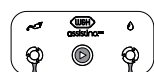

No se ilumina ningún LED.

Producto sanitario en modo en espera:

> Pulse la tecla de inicio.
 El producto sanitario no está conectado a la red de corriente:
 > Establezca la alimentación de corriente.



Los LED del W&H Service Oil y el W&H Activefluid se iluminan de color naranja.

Poco líquido en el cartucho:

> Cambie los cartuchos lo antes posible.



Los LED del W&H Service Oil y el W&H Activefluid se iluminan de color rojo.


Cartuchos vacíos:

> Cambie los cartuchos.
 > Realice el primer llenado.

3. Realizar el primer llenado




> Realice el primer llenado sin instrumento de transmisión.
 > Comience con una cámara arbitraria.

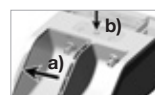


a) Cierre una cámara con la ventana corredera.
b) Pulse la tecla de inicio durante unos 5 segundos.




El primer llenado de la primera cámara dura aprox. 1 minuto.
 > El LED de la cámara parpadea de color verde.
 > Los LED del W&H Service Oil y el W&H Activefluid se iluminan de color verde.




El primer llenado de la primera cámara ha finalizado correctamente.
 > El LED de la primera cámara parpadea de color verde.
 > El LED de la segunda cámara parpadea de color naranja.
 > Los LED del W&H Service Oil y el W&H Activefluid se iluminan de color verde.




c) Cierre la otra cámara con la ventana corredera.
 > El primer llenado se realiza automáticamente.



El primer llenado de la segunda cámara dura aprox. 1 minuto.
 > El LED de la cámara parpadea de color verde.
 > Los LED del W&H Service Oil y el W&H Activefluid se iluminan de color verde.




El primer llenado ha finalizado correctamente.
 > Los LED de ambas cámaras parpadearán de color verde.

4. Puesta en marcha

Equipar/extraer instrumentos de transmisión con conexión ISO



a) Conecte el instrumento de transmisión con el orificio de salida hacia abajo en el adaptador.
 Coloque el anillo de giro del micromotor de aire hacia la derecha o la izquierda.
 En posición «0» no se realiza ningún mantenimiento.



b) Deje caer el botón de desbloqueo hacia delante y extraiga el instrumento de transmisión.
c) Cierre la ventana corredera.
d) Pulse la tecla de inicio.

Equipar/extraer instrumentos de transmisión o adaptadores con conexión fija RM




a) Conecte el instrumento de transmisión o el adaptador en el adaptador Quick RM y apriete la funda de sujeción girándola hacia la izquierda con la mano.



b) Conecte el adaptador Quick RM con el instrumento de transmisión o, cuando corresponda, conecte el adaptador con instrumento de transmisión.
c) Cierre la ventana corredera.
d) Pulse la tecla de inicio.




Se realiza el proceso de mantenimiento.

 > El LED parpadea de color verde.
 > El proceso de mantenimiento se realiza en unos 10 segundos de forma automática.



El proceso de mantenimiento ha finalizado correctamente.


 > El LED de la cámara se ilumina de color verde.
 > Se emite un tono de señal.

Resumen del mensaje de errores



Ventana corredera abierta:
 > Cierre la ventana corredera.

Los LED de las cámaras se iluminan de color naranja.

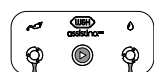

No se ilumina ningún LED.

Producto sanitario en modo en espera:

> Pulse la tecla de inicio.
 El producto sanitario no está conectado a la red de corriente:
 > Establezca la alimentación de corriente.



Los LED del W&H Service Oil y el W&H Activefluid se iluminan de color naranja.

Poco líquido en el cartucho:

> Cambie los cartuchos lo antes posible.



Los LED del W&H Service Oil y el W&H Activefluid se iluminan de color rojo.

Cartuchos vacíos:

> Cambie los cartuchos.
 > Realice el primer llenado.

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en **wh.com**



Manual rápido para Assistina Twin

Resumen del mensaje de errores



Los LED de las cámaras y la tecla de inicio se iluminan de color rojo.

Fallo electrónico:

- › Desconecte y vuelva a conectar el producto sanitario.
- › Pulse la tecla de inicio.
- › Envíe el producto sanitario completo a un Servicio Técnico Autorizado W&H.



El LED de la cámara derecha o izquierda se ilumina de color rojo. El LED de la tecla de inicio se ilumina de color verde.

El proceso de mantenimiento no ha finalizado correctamente:


- › Pulse la tecla de inicio.
- › Repita el proceso de mantenimiento.



El LED de la tecla de inicio se ilumina de color azul.

Falta de aire:

- › Vuelva a establecer la alimentación de aire.

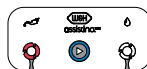

El LED de la cámara derecha o izquierda se ilumina de color rojo. El LED de la tecla de inicio se ilumina de color azul.

El proceso de mantenimiento no ha finalizado correctamente – Falta de aire Luftmangel:

- › Vuelva a establecer la alimentación de aire.
- › Pulse la tecla de inicio.
- › Repita el proceso de mantenimiento.



El LED de la cámara derecha o izquierda, los LED del W&H Service Oil y el W&H Activefluid se iluminan de color rojo. El LED de la tecla de inicio se ilumina de color verde.

El primer llenado no ha finalizado correctamente:

- › Controle los cartuchos: están introducidos correctamente, están vacíos (cambie los cartuchos).
- › Pulse la tecla de inicio.
- › Repita el primer llenado.



El LED de la cámara derecha o izquierda, y el LED del W&H Service Oil y el W&H Activefluid se iluminan de color rojo. El LED de la tecla de inicio se ilumina de color azul.

El primer llenado no ha finalizado correctamente.

- Falta de aire
- › Vuelva a establecer la alimentación de aire.
 - › Pulse la tecla de inicio.
 - › Repita el primer llenado.



El LED de la cámara derecha o izquierda se ilumina de color rojo. El LED de la tecla de inicio se ilumina de color morado.

La lubricación del sistema de sujeción no ha finalizado correctamente:

- › Pulse la tecla de inicio.
- › Repita la lubricación.