

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en **wh.com**



# El agua más pura para todos los sistemas



multidem


## Tratamiento del agua de nueva generación

Aproveche ahora las numerosas ventajas que le ofrece la instalación de su nuevo sistema de depuración de agua Multidem de W&H.

Multidem ofrece un agua desmineralizada de gran calidad para la generación de vapor en las autoclaves. Con ello se garantiza un rendimiento óptimo y homogéneo y la prolongación de la vida útil de su esterilizador o equipo de depuración. Además, el dispositivo está equipado con una pistola de pulverización especialmente idónea para la limpieza del instrumental antes de la esterilización.



## Un manejo extremadamente fácil

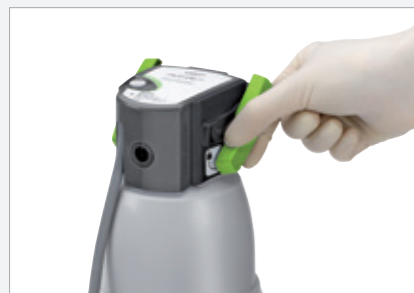

**1.** Para sustituir un cartucho gastado, abra el asa de cierre.




**2.** Gire el asa de cierre hasta llegar al tope, pulse el botón de barrido para la descarga de la presión y quite el cabezal del filtro del cartucho gastado.



**3.** Una vez retirada la tapa protectora, coloque verticalmente el cabezal del filtro en un nuevo cartucho. Ahora Multidem estará de nuevo plenamente operativo.

## Compatible con todos los dispositivos

El sistema de tratamiento del agua también se puede utilizar en muchas de las autoclaves y equipos de tratamiento convencionales.

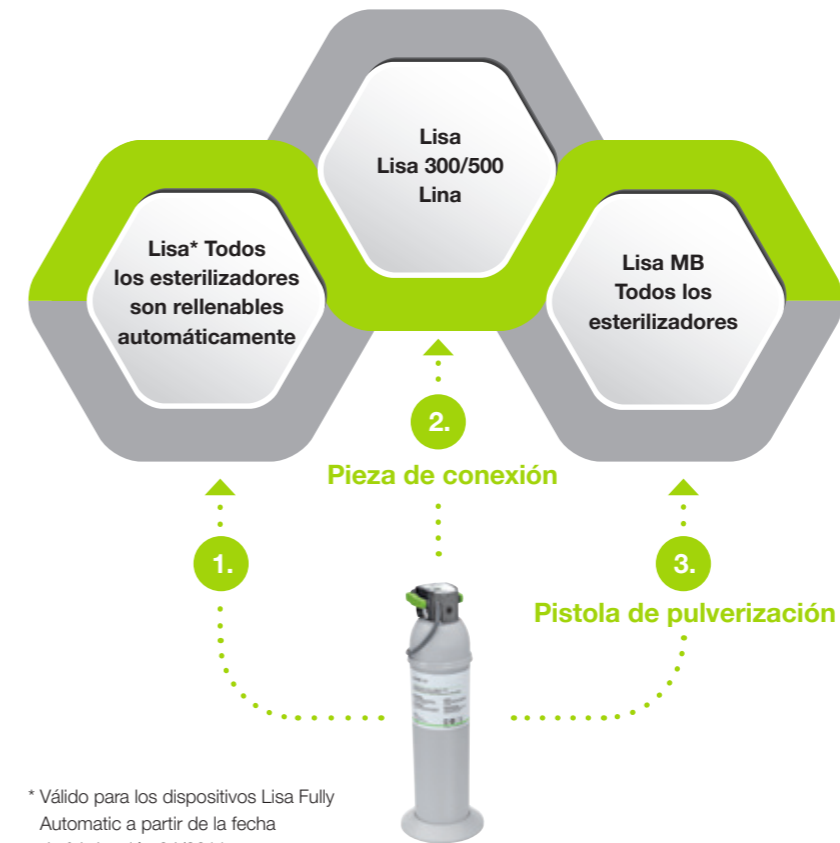

\* Válido para los dispositivos Lisa Fully Automatic a partir de la fecha de fabricación 04/2011

### 1. Conexión directa

Multidem permite conectarse directamente a la Lisa Completamente Automática y a todos los esterilizadores que se rellenan automáticamente.

### 2. Mediante una pieza de conexión

Con una pieza de conexión (SAT/Water-Supply-Kit) podrán conectarse las autoclaves Lisa, Lisa 300/500 y Lina al Multidem.

### 3. Relleno manual

El esterilizador Lisa MB, así como todos los esterilizadores que no se rellenan automáticamente podrán hacerlo con la ayuda de la pistola de pulverización.

## Principales Ventajas

### Facilidad de uso

- › El cambio de cartucho se realiza de forma rápida y sin necesidad de herramientas
- › Es posible colocar los cartuchos sin fijación

### Compatible


- › Se puede utilizar en las autoclaves y los equipos de purificación convencionales
- › Implementación flexible en combinación con la pistola de pulverización

### Económico


- › No es necesaria una toma de corriente
- › Resina mejorada de intercambio iónico

### Seguro

- › El agua pura cumple las recomendaciones y especificaciones pertinentes para el funcionamiento de los esterilizadores de vapor y para el tratamiento de los instrumentos
- › Una buena calidad del agua constante y sin depósitos de cal

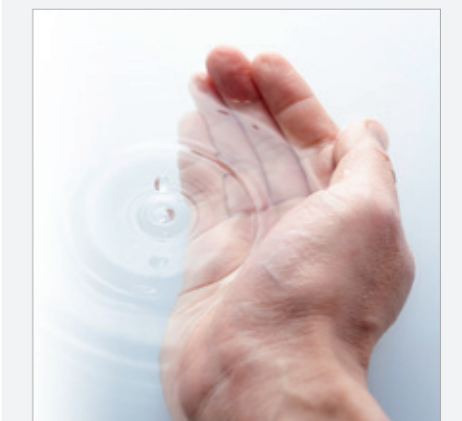

# Datos técnicos

<b>Modelo:</b>	<b>Multidem C27</b>
<b>Presión de servicio:</b>	2 bar – máx. 8,6 bar
<b>Temperatura de entrada del agua:</b>	4 – 30 °C / 40 – 86 °F
<b>Caudal nominal:</b>	60 l/h
<b>Calidad de salida del agua:</b>	desmineralizada (EN 13060)
<b>Calidad de entrada del agua:</b>	Agua potable
<b>Peso:</b>	2,7 kg
<b>Anchura/Profundidad/Altura:</b>	124 / 123 / 476 mm
<b>Posición de funcionamiento:</b>	vertical
<b>Longitudes del tubo flexible:</b>	2 x 3 m
<b>Válvula de seguridad:</b>	sí
<b>Bloqueo de reflujo:</b>	
<b>Volumen:</b>	Cabezal del filtro, cartucho con 2,7 kg, tubos flexibles y conexiones (incl. Water Block®), Pistola de pulverización opcional

Cuando estén los equipos desconectados, tenga en cuenta que el seguro correspondiente para evitar reflujos cumpla las directrices, normas e indicaciones específicas del país.

## Fabricante:

**W&H Sterilization Srl.**  
Via Bolgara, 2  
24060 Brusaporto (BG), **Italy**  
**t** +39 035-66 63 000  
**f** +39 035-50 96 988  
office.sterilization@wh.com  
**wh.com**

## Distribución:

**Wehadent Iberica S.L Unipersonal**  
C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, **España**  
**t** +34 96 353 20 20  
oficinas.es@wh.com  
**wh.com**