

#whdentalwerk



video.wh.com

Теперь у вашего
торгового агента или
на сайте **wh.com**



Минимально
инвазивный,
**максимально
эффективный**



piezomed

BOOST


Чрезвычайно мощный и быстрый

Функция Boost увеличивает базовую мощность на 20% за короткий промежуток времени



Новые возможности в пьезохирургии

Piezomed облегчает работу хирурга: благодаря инновационной ультразвуковой технологии костная ткань подвергается обработке различными насадками с высокой точностью. Окружающая мягкая ткань остается неповрежденной. Заметное облегчение для пациента: меньше боли, более быстрое заживление!

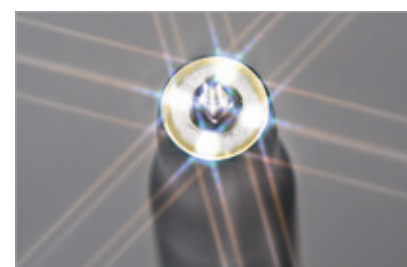

Инновационное кольцо светодиодов LED ring

Идеальное бестеневое освещение оперируемого участка.



Отличные режущие характеристики

Специальный дизайн зубьев пилки гарантирует высокую точность резки и экономит время!

Эффективное охлаждение

Отверстие для выхода охлаждающей жидкости находится рядом с рабочей зоной насадки и охлаждает операционное поле чрезвычайно эффективно.




Автоматическое распознавание насадки

Piezomed распознает установленную насадку и защищает ее от перегрузки.



Автоматическое распознавание насадки

Впервые в мире: как только насадка установлена, Piezomed автоматически распознает насадку и регулирует уровень мощности. Это не только облегчает работу, но и повышает безопасность. Снижается риск перегрузки насадок и продлевается срок их службы!

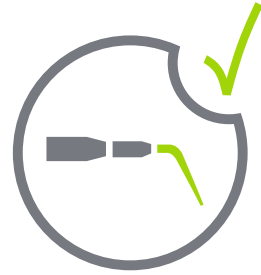

Автоматическое распознавание насадки

Как только насадка установлена, Piezomed автоматически распознает насадку и регулирует уровень мощности.



Каждая насадка на своём месте
Разные типы насадок размещены в удобных подставках.

Новый дизайн зубьев пилки

Тонкий разрез благодаря тонким зубьям пилки ведет к малой потере костной ткани при заборе костных блоков.



	3
	3
	90
	50%
	B

Индивидуально регулируемые рабочие режимы

Мощность можно менять вручную для каждого типа насадок.



Насадка для синус-лифтинга

Насадка для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Защита слизистой от перегрева благодаря наличию «подушки» из охлажденного раствора.



Новая специальная пилка

Новая костная пилка восхищает чрезвычайно высокими режущими характеристиками. Вы работаете эффективно и экономите время!

Аппарат Piezomed – это индивидуальный подход к вашему стилю работы

Функции аппарата Piezomed рассчитаны на индивидуальный подход — возможна индивидуальная настройка мощности в определенном диапазоне: “Power”, “Basic” и “Smooth”. В линейке из 24 насадок от компании W&H представлены насадки для каждого клинического случая.



Охлаждение именно там, где это необходимо

Отверстие для выхода охлаждающей жидкости находится рядом с рабочей зоной насадки, это гарантирует оптимальное охлаждение инструмента и твердой ткани.

Удобная ножная педаль

Многофункциональная ножная педаль даёт оптимальную свободу вашим рукам.


Режим работы “Power”

Мощность растёт с увеличением давления на насадку. (Возможна функция Boost)




Режим работы “Basic”

Мощность не меняется от нагрузки на насадку. (Возможна функция Boost)

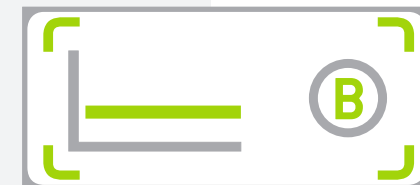

Режим работы “Smooth”

Мощность уменьшается с увеличением давления на насадку.

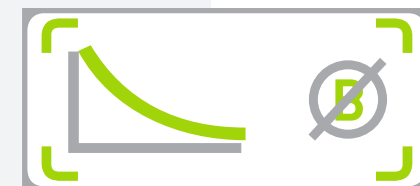

Универсальность и эргономичность

Беспроводной блок
ножного управления
для управления
несколькими приборами
W&H, такими как
Implantmed и Piezomed.



Абсолютная свобода движений

Беспроводной блок
ножного управления
позволяет свободно
выбирать оптимальное
расположение в рабочей
зоне и обеспечить
высокий уровень
безопасности.



Один блок для всех аппаратов

Управляйте функциями
аппаратов Implantmed
и Piezomed с помощью
одного блока
ножного управления.

«Невероятно простое применение в комбинации с Implantmed и Piezomed».

Проф., д-р Хосе Луис Кальво Гирадо (José Luis Calvo Guirado), доктор стоматологии, доктор наук, доктор наук в Европе, магистр наук, стоматолог-хирург, Испания

беспроводной!

Хирургические процедуры никогда ещё не были такими быстрыми и безопасными

С аппаратом Piezomed Вы получаете в свои руки все преимущества инновационной пьезотехнологии: Высокочастотные микровибрации позволяют разрезать кость с невероятной точностью. Эффект кавитации ультразвуковых волн обеспечивает видимость в оперируемой области. Иными словами: минимально инвазивно, максимально эффективно!

Забор блока кости
Идеально подходит для трансплантации внутриротовых костных блоков. Выполнение тонких и глубоких разрезов за рекордное время!

удаление зуба с помощью periotomy
Даже в сложных случаях удаления зуба возможно избежать повреждения костной и мягких тканей.

Тончайшие разрезы
Аппарат Piezomed позволяет проводить минимально инвазивные операции с максимальной хирургической точностью.



Латеральный синус-лифтинг
Атравматичное формирование костного «окна» при латеральном синус-лифтинге. Отслоение слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи без перфорации.

Расщепление альвеолярного гребня
Хирургические разрезы точные и безопасные, поле обзора без крови во время операции.

Защита мягких тканей
Быстрый процесс заживления, благодаря атравматичному воздействию на нервы и сосуды!

Технические характеристики



Тип:	SA-320
Напряжение сети:	100 – 130 V / 220 – 240 V
Допустимое колебание напряжения:	±10 %
Номинальная сила тока:	0.1 – 1.0 A / 0.1 – 0.5 A
Частота:	50 – 60 Hz
Максимальная потребляемая мощность:	90 VA
Максимальная выходная мощность:	24 W
Расход охладителя на 100 %:	min. 50 ml/min
Размер (Ширина x Глубина x Высота):	256 x 305 x 109 mm
Вес:	7кг

Производитель:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Официальный дилер компании W&H в России:

ОМТ, Москва
Тел.: +7800 2229987
+7499 9952380
+7499 9952378
info@omt.ru
www.omt.ru