

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en **wh.com**



# Scaler de aire rápido y potente



proxeo SONIC

# Profilaxis con estilo

## Rápido y potente.

El scaler accionado por aire con spray integrado y dos grandes salidas de luz es ideal para la eliminación mecanizada de la placa y el sarro, así como la limpieza de la raíz del diente. El resultado: aumento de la sensación de bienestar y confianza de sus pacientes gracias a la limpieza de las superficies dentales.



### Regulación continua

El uso potente y controlado de la potencia puede adaptarse según la aplicación por medio del regulador de potencia.



### Salidas de luz grandes

Las dos salidas de luz grandes iluminan la zona de tratamiento.




### Cambiador de puntas W&H

Cambio fácil de las puntas y protección ante lesiones con el cambio de puntas de W&H.



### Spray integrado

El spray integrado refrigera constantemente el lugar de tratamiento.

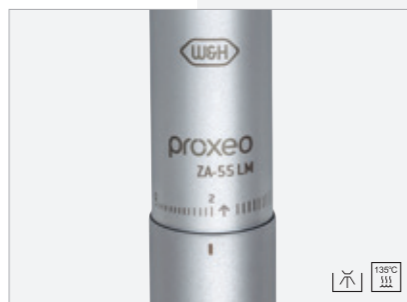

### Diseñado para la mejor higiene

Los instrumentos se pueden limpiar fácilmente gracias a su superficie lisa y son termodesinfectables y esterilizables.

# Puntas para cada aplicación

## Diseño versátil y ergonómico.

La variedad del surtido de puntas y el diseño optimizado de cada una de ellas le permiten eliminar el sarro con suavidad y a fondo, incluso en las zonas de difícil acceso.<sup>1</sup>



### Punta de profilaxis 1AU

Para la eliminación del sarro, uso universal, también para superficies molares curvadas con inclinación lingual.



### Punta de profilaxis 2AU

Para dientes anteriores en el maxilar inferior, superficies linguales, y en casos de bandas de sarro con una fuerte adhesión, gruesas y duras.




### Punta de profilaxis 3AU

Para retirar sedimentos en la parte cervical y también para la eliminación de depósitos de nicotina.



### Punta de periodontología 1AP

Eliminación de depósitos subgingivales, especialmente adecuado para bolsas periodontales profundas.

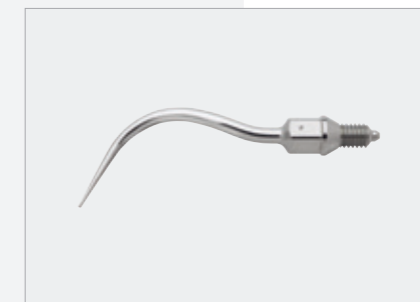

### Punta de periodontología 2APr, 2API

Punta para la eliminación de depósitos subgingivales. Disponible curvado hacia la derecha o hacia la izquierda.



### Punta de periodontología 3AP

Con un revestimiento de diamante en la punta del instrumento para el desbridamiento periodontal de furcaciones y concavidades.

<sup>1</sup>Seidel, M., Borenus, H., Schorr, S. et al. Results of an experimental study of subgingival cleaning effectiveness in the furcation area. BMC Oral Health 21, 381 (2021).

# Datos técnicos

## Scaler de aire Proxeo



Tipo:	ZA-55 LM / ZA-55 LS	ZA-55 / ZA-55 M
Luz:	Sí	No
Regulación de potencia:	Sí	No
Frecuencia de oscilación:	6 kHz	
Amplitud de oscilación:	< 200 µm*	
Presión de funcionamiento:	3,4 ± 0,3 bar	
Cantidad de refrigerante:	20–50 ml/min	
Acoplamiento:	RM-34 LED, Multiflex®** / Sirona®**	RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Multiflex®**
Puntas W&H utilizables:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Las puntas de otros fabricantes deben estar autorizadas para el scaler de aire de W&H.	

\* Depende de la punta y el ajuste de potencia.

\*\* Multiflex® y Sirona® son marcas de terceros que no guardan relación alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.



Tipo:	ZE-55 BC	ZE-55 RM
Luz:	No	
Regulación de potencia:	No	
Frecuencia de oscilación:	6 kHz	
Amplitud de oscilación:	< 200 µm*	
Presión de funcionamiento:	2,5 ± 0,3 bar	
Cantidad de refrigerante:	20–50 ml/min	
Acoplamiento:	 Conexión fija 	
Puntas W&H utilizables:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Las puntas de otros fabricantes deben estar autorizadas para el scaler de aire de W&H.	



### Acoplamiento LED RM-34 de W&H para conexión Multiflex®\*\*

- › Aplicación de LED sin necesidad de adaptación de la unidad dental
- › Larga vida útil de los LED
- › Regulación continua de la entrada de agua del spray
- › Válvula antirretorno
- › 24 meses de garantía

#### Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
 5111 Bürmoos, **Austria**  
 t +43 6274 6236-0  
 f +43 6274 6236-55  
 office@wh.com  
 wh.com

#### Distribución:

**Wehadent Ibérica S.L Unipersonal**  
 C/Canónigo Tárrega, 33  
 46014 Valencia, **España**  
 t +34 96 353 20 20  
 oficinas.es@wh.com  
 wh.com