

#whdentalwerk
f @ in ▶
video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en wh.com



Piezomed

Guía de higiene

Limpios, cuidados, esterilizados.

Una guía para el recorrido de sus piezas de mano, instrumentos y unidades de control a través del ciclo de procesamiento.



piezomed

1 PRIMER TRATAMIENTO EN EL LUGAR DE USO



1.1 Guantes

1.2 Desconectar el instrumento

Desconecte el instrumento de la pieza de mano y sumérjalo en desinfectante.

1.3 Desconectar la pieza de mano Piezomed

Desconecte la pieza de mano Piezomed junto al cable.

1.4 Desinfección previa

Limpie la pieza de mano Piezomed junto al cable, la maquinaria y el soporte con desinfectante.

1.5 Desmontar

Desenrosque la carcasa externa de la pieza de mano Piezomed y extraiga el zócalo del LED.

2 PROCESAMIENTO


Limpieza y desinfección

MECANIZADO

Limpieza y desinfección



Coloque la pieza de mano con los accesorios en la cesta.

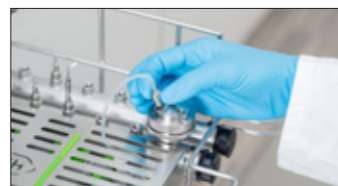

Conecte la manguera de limpieza del tubo de refrigerante a la pieza de mano.



Desenrosque los instrumentos Piezomed del adaptador del Desinfectante térmico.

0

MANUAL

Limpieza



Sumerja los instrumentos Piezomed individuales o en el clip de instrumentos en el baño ultrasónico.



Cepille y enjuague la pieza de mano desmontada junto al cable, la superficie universal y el cambiador de instrumentos.



1. Enjuague el tubo de refrigerante con una jeringa de limpieza.
2. Lave y enjuague los instrumentos y el clip de instrumentos.

MANUAL

Desinfección



Desinfecte las piezas individuales de la pieza de mano Piezomed y compruebe el tiempo de actuación del desinfectante.

2.1



2.2



2.3



2.4



2.7

Almacenamiento


Almacene los productos esterilizados a temperatura ambiente en un lugar libre de polvo y seco, y de forma protegida frente a la contaminación y la radiación solar.



2.6

Esterilización

Esterilización en un esterilizador de clase B.

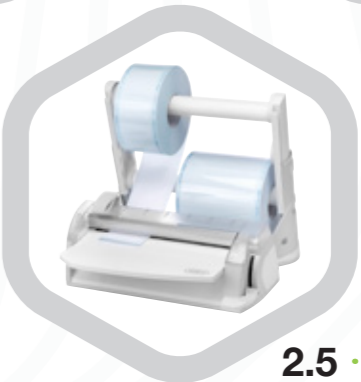

2.5

Embalaje

Embale la caja de esterilización o las piezas individuales en bolsas de esterilización.

Secado

Seque las piezas individuales con aire comprimido.

Control, mantenimiento e inspección

Compruebe visualmente que las piezas individuales no presentan daños o restos de suciedad.

Montaje de las piezas individuales

Vuelva a acoplar la pieza de mano con cable.

